

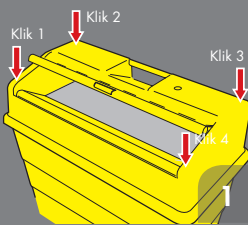
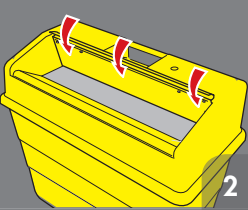
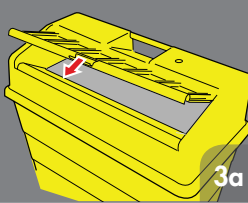
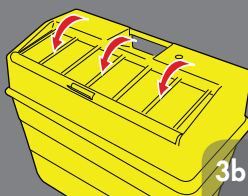
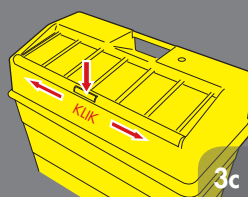


PRODUKTSPECIFIKATIONER				
Produktnavn		Sharpsafe kanyleboks 30,0 liter		
Producent		Frontier Medical Group, South Wales, UK		
Varenummer		DK4180		
Anvendelse og montering		Kanyleboksen er engangs og anvendes til sikker bortskaffelse af skarpt og smittefarligt affald Boksen er stabelbar og leveres usamlet – vend arket for vejledning		
Kapacitet op til fyldstreg (nettoindhold)		30,0 liter		
Dimensioner (h x b x d)		415 x 450 x 230 mm		
Aftagstyper		Stort hul i låget til bortskaffekse af større skarpe ting fx dropsæt, medicin og blodsæt m.m.		
Vægt (uden indhold)		1244 gr		
Pakning		Karton: 10 stk. / Europalle: 5 x karton		
Materiale		Polypropylen (miljøvenligt materiale der omdannes til vand og kuldioxid ved forbrænding)		
Godkendelser			Produktet bærer to godkendelser: 1. Kitemark® (British Standard) 2. UN (United Nations)	
Advarsler			Produktet bærer en advarsel: 1. Boksens indhold udgør en biologisk risiko HUSK! Der bør altid udvises forsigtighed og agtpågivenhed i håndteringen af brugte kanylebokse	
Bortskaffelse		Bortskaffelse sker ved forbrænding Kanyleboksen er forsynet med en etiket (på engelsk), hvor man aht. sporing kan udfylde dato for ibrugtagning m.m.		
Beslag, stands og ophæng (Varenummer og beskrivelse)		DK4480	Piedestal trolley	

Vend arket og se vejledning →



SÅDAN SAMLER OG ANVENDER DU SHARPSAFE KANYLEBOKSEN

	Montering Sæt kanyleboksen på et stabilt underlag (et bord eller lign.) Låget monteres med et fast tryk ned på hvert hjørne af dette Et hørbart klik fra hvert hjørne bekræfter, at låget er monteret korrekt på beholderen Udfyld evt. etiketten på kanyleboksen med navn og dato for samling af boksen
	Midlertidig åbning Kanyleboksen kan åbnes midlertidigt ved at trykke flappen ned
	Permanent lukning Når boksen er fuld, træk flappen frem (brug tappen)
	Tryk flappen ned over aftagshullet
	Læg et fast tryk langs flappens forside Et hørbart klik bekræfter at flappen er tillukket Udfyld resterende felter på etiketten med navn og dato for permanent lukning af boksen

DK 200722

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com