



Indikasjon:
Som beskyttelse mot hudskader forårsaket av friksjon og kroppsvæsker (inkontinens). Vanntett fiksasjon av primær-bandasje, f.eks. kompresser, alginatbandasje eller polyuretan-skumbandasje.

Filmbandasje på rull

MEDIPLAST kan tilby usterile transparente filmbandasjer på rull. Klippes til rett størrelse med maksimal fleksibilitet. Former seg lett etter kroppskonturer. Elastiteten muliggjør fri bevegelse uten at huden skades. Produktet er usterilt og skal ikke brukes på skadet hud, åpne sår eller IV-innganger.


Rullen ligger en-stykkforpakket i boks.

Lengde: 10 meter

Artikkelnummer	Størrelse	Antall/avd.frp	Antall/trp.frp
60701005	5 cm	1	48
60701010	10 cm	1	24
60701015	15 cm	1	24

Gjør følgende:

Klipp til ønsket lengde. Ta bort det hvite beskyttelsepapiret og fest filmen på huden. Dra av det øvre transparente beskyttelsepapiret ved å dra mot pilenes retning.

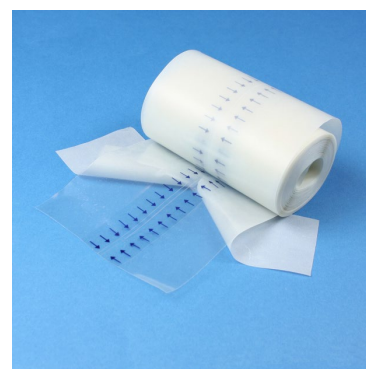

Avd.fp = min.kvant/best