



# Klargjøring før bruk: NONELENS og NOENFRAME




MEDI PLAST

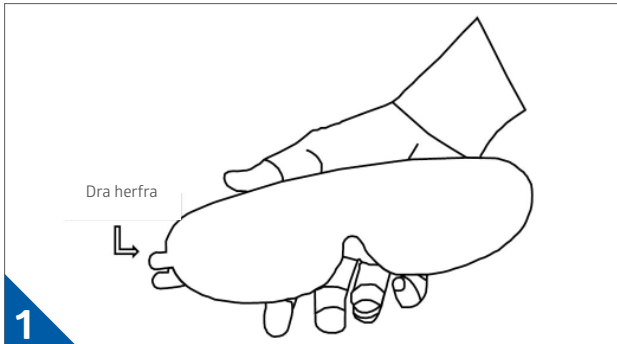


1 Fjern linsen (NONELENS) fra dispenserresken.

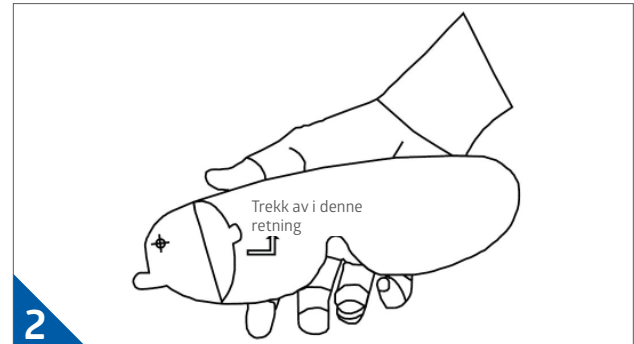


2 Trekk den beskyttende indre folien av ved å dra den øvre fliken mot deg.

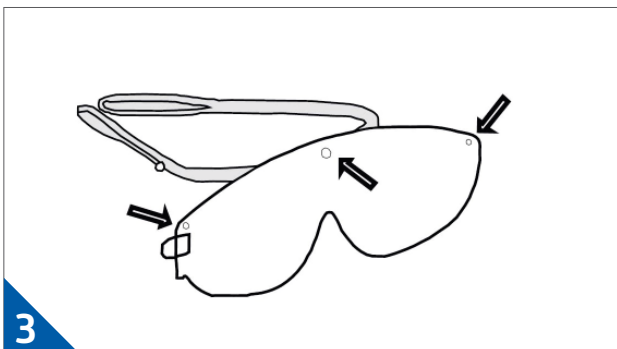

3 Fest linsens tre hull i den korresponderende flergangs innfatningen (NOENFRAME). Gjenværende folie skal sitte på utsiden.

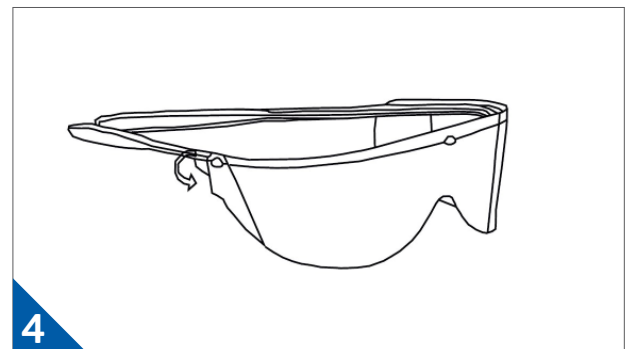

4 Fjern det ytre laget ved hjelp av samme metode som i trinn 2, etter linsen er festet på innfatningen.

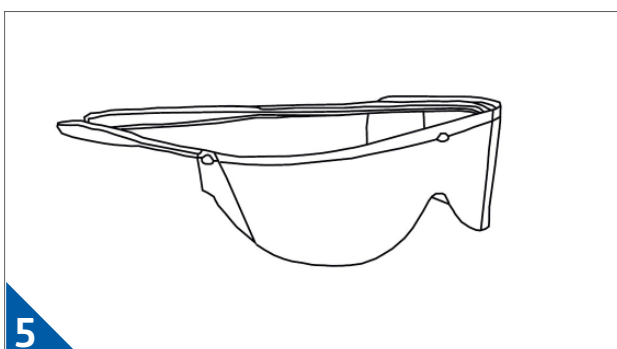

5 Enheten kan nå brukes og er beskyttet mot riper.

Rengjør eller desinfiser NOENFRAME ved å tørke over med en opptil 70% flytende isopropanol

**Hvis du vil lære mer om prosedyremasker,** ta kontakt med din Medline-representant, eller besøk [www.medline.eu](http://www.medline.eu)