


Dato	Sign	Måned
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Brukermanual til vaskelukk

Nemo rengjøres ved å tørke av med en klut med et godkjent vaskemiddel. Enhetens tømmekammer rengjøres daglig ved å kjøre en tømmesyklus med vaskelukk, og hvis nødvendig mekanisk rengjøring.

1. Åpne lokket på enheten.
2. Plasser vaskelokket i tømmekammeret.

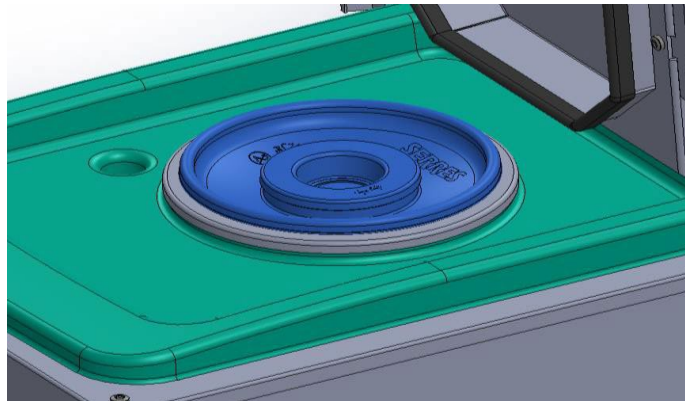

3. Lukk lokket på Nemo ved å trykke håndtaket ned til låsen aktiveres, og start programmet ved at trykke på start/pause knappen på maskinens front. Enheten kjører deretter et tømmeprogram på ca. 15 sekunder. Når programmet er avsluttet, skru maskinen seg av.
4. Når programmet er avsluttet kan lokket åpnes og det brukte vaskelokket sorteres etter avdelingens avfallsrutiner.

Rengjøringsprogrammet skal kjøres minst én gang daglig.