



Gælder for modul 7047A001, 7047A011 og 7047A016.

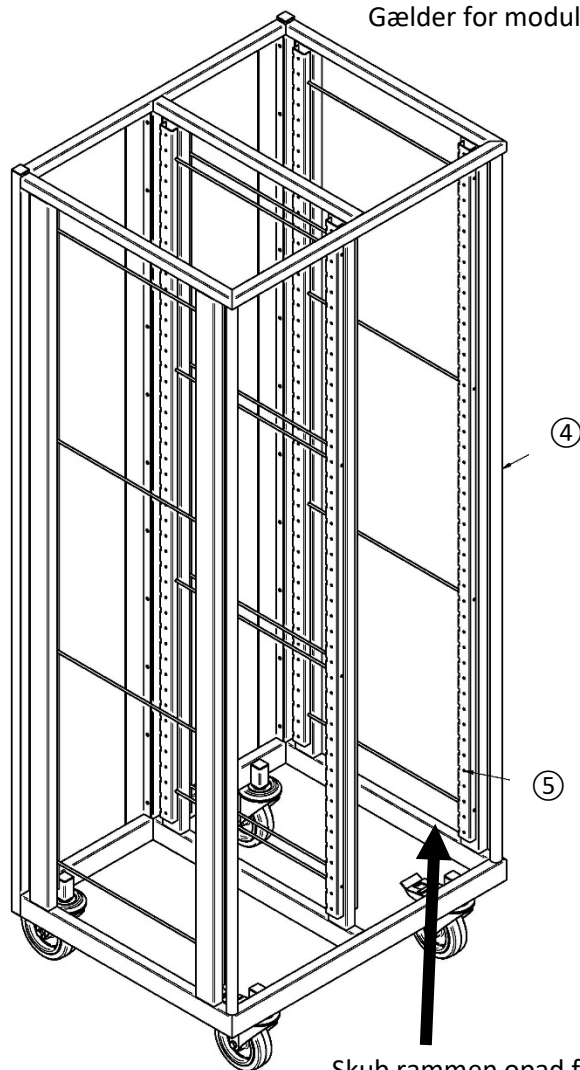

Skub rammen opad for at løsne den

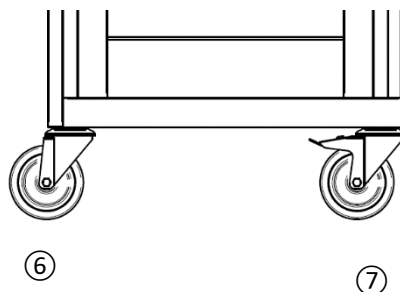


1	Udtagelig hylde	7047A028
2	Skinne venstre	(indgår i ovenstående produkt)
3	Skinne højre	(indgår i ovenstående produkt)
4	Stelkonstruktion	7047A003
5	Ramme	7047A005
6	Hjul	8470UFX125P30-13
7	Hjul bremset	8477UFD125P30-13
-	Top og bund	70470047
-	Fast hylde	70470001

Sådan ændres højden på hyldepladen

1. Tag hyldepladen ud.
2. Fjern rammen (5). Hold fast i rammen, mens du banker den let nedad for at løsne den. Anvend f.eks. en plast- eller nylonhammer til denne opgave.
3. Tag rammen ud (5).
4. Skinnen løsnes ved hjælp af et let bank forrest på skinnen (2&3).
5. Anbring skinnen (2&3) i den ønskede position, og bank eller træk den på plads.
6. Hæng rammen (5) tilbage i stelkonstruktionen (4), og brug hammeren til at banke rammen på plads.

OBS! brug ikke vold.
Lette slag med hammeren er nok.

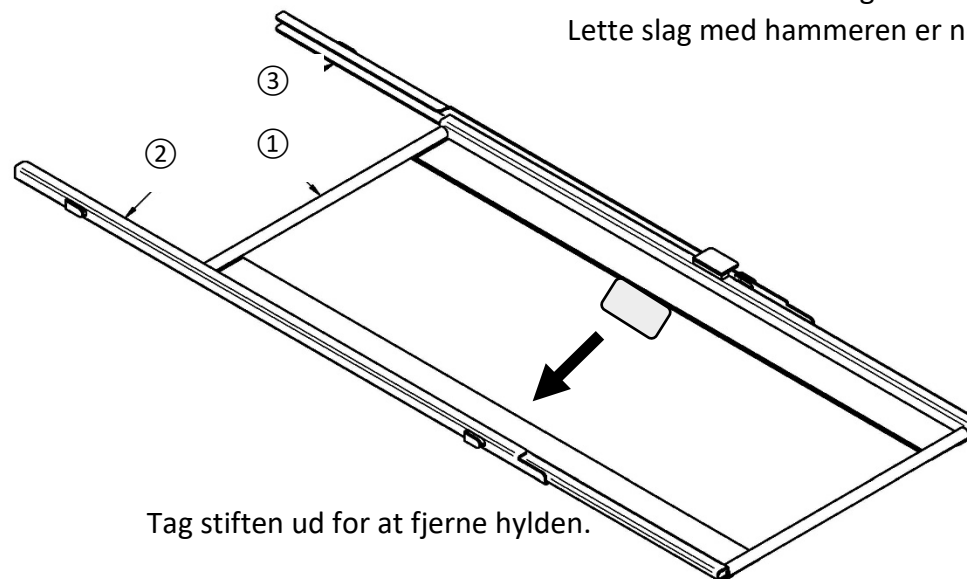

Tag stiften ud for at fjerne hylden.

MEDI PLAST

Medioplast A/S – Marielundvej 46E – 2730 Herlev

T 43 44 40 00 – info.dk@mediplast.com

DK 20230731 rev 1

SILVER STÅL