



Medifusor – Tryk-infusionspose

Tryk-infusionspose er en oppustelig manchet, der er beregnet til at udøve tryk på IV-poser for at opnå en hurtig væskeinfusion.

- Findes i nylonbelagt PU (polyurethan), som passer til både 500 ml samt 1.000 ml infusionsposer, beregnet til engangsbrug
- Derudover i to forskellige størrelser i transparent PU, som passer til henholdsvis 500 ml og 1.000 ml infusionsposer, beregnet til flergangsbrug
- Driftstrykket varierer fra 0~300mmHg
- Læs brugsanvisningen før brug

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
604805	Grå nylon 500-1.000 ml	1/6
604807	Transparent 500 ml	1/6
604810	Transparent 1.000 ml	1/6
Reservedel		
604811	Pumpe med 3-vejshane passer til alle trykposer	1/30

Æske = mindste kvantitet/bestilling



Rengøring og vedligeholdelseMedifusor trykinfusionsposer - til flergangsbrug

1. Aftør manchettens, slangernes og trykboldens overflader med 70 % alkohol, men undgå berøring med måleren. Sprøjt ikke alkohol, så dug kan komme ind i måleren, og lad det tørre ved stuetemperatur efter få minutter. Kontroller at måleren er helt tør, før opbevaring.
2. Regelmæssigt tjek om målerens nål bevæger sig, når trykbolden pumpes lidt, samt at nålen forbliver på nul, når der ikke udøves noget tryk.

Materiale:

Varenr 604805 Nylonbelagt PU
Varenr 604807 Transparent PU
Varenr 604810 Transparent PU
Slinger og pumpe i PVC

