



SUGEKATETRE


Rett, coudé (bøyd)
og med vakuumkontroll

Medioplast har et av Nordens største utvalg av sugekatetre av høy kvalitet, utformet for alle mulige ulike behov i verden. Avhengig av hvilket bruksområde det gjelder, tilbyr vi ikke bare ulike lengder og størrelser, men også ulike design, materialer og forpakningstyper.


DESIGN

Alle sugekatetre har et mykt, rundt hull i spissen, **uten spisse kanter**. De har også to parallelle avlastningshull, ca. én cm opp fra enden, for å komme til ved atraumatisk suging .



Coudé-kateteret har en **vinklet spiss** som gjør det mulig å styre retningen på kateteret ned i bronkietreet. En liten knott på konnektoren indikerer i hvilken retning spissen er bøyd.

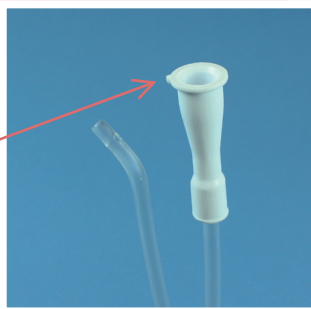

Det finnes sugekatetre med innebygd **vakuumkontroll** for å enkelt kunne styre sugestyrken med fingertuppen ved hjelp av intermitterende sugeteknikk.

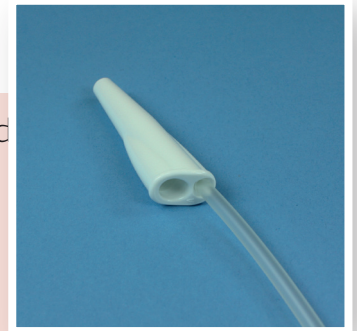


Alle sugekatetre har en fargekodet kontakt i henhold til standarden for sugekatetre **EN ISO 8836:2019**, for å gjøre det enkelt å identifisere riktig størrelse.

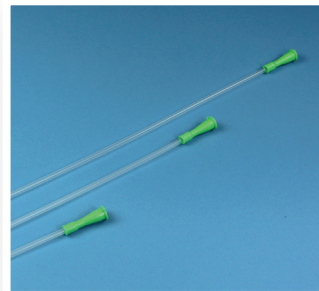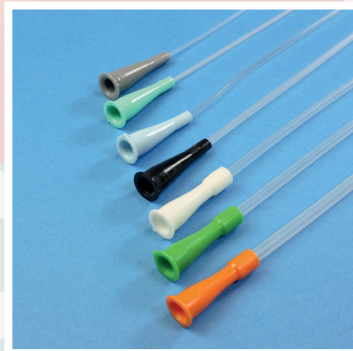

Rette katetre finnes i **tre lengder**, inklusivt kontakt (4 cm), på 25 cm, 40 cm og 53 cm.

Sugekatetre med vakuumkontroll finnes i **to lengder** inklusivt kontakt (6 cm): 35 cm sugekateter med centimetergradering, og 53 cm uten gradering.

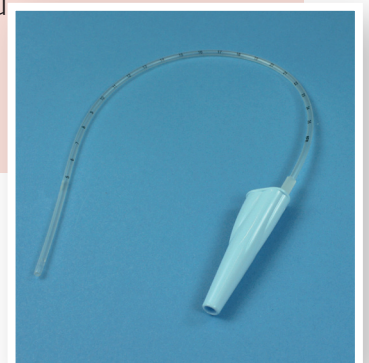

Coudé-sugekateter (bøyd) finnes i lengden 53 cm, inklusivt kontakt (4 cm).



Alle sugekatetre er et engangsprodukt som leveres sterile, med **holdbarhet i fem år**. Steriliseringsteknikk: etylenoksid.

MATERIALE


Mediplast tilbyr sugekatetre i to ulike materialer: **PVC uten ftalater, eller TPE**, som er et PVC-fritt materiale. Mykgjøreren som brukes for PVC er et ftalatfritt middel som heter ATBC.

Materialet i et sugekateter resirkuleres sjelden, men sendes i de fleste tilfeller til forbrenning. Av miljøhensyn prøver vi i dag å unngå bruk av PVC fordi dette er en klorert plast som danner saltsyre (HCl) under forbrenning. Spesielle fasiliteter kreves for å håndtere saltsyren som oppstår, og i tilfeller der det er PVC-frie alternativer, anbefales dette i stedet.

For brukeren er det også en ubetydelig forskjell i de to materialene. Det PVC-frie alternativet er noe mer stabilt, mens PVC-sugekateteret er litt mykere og mer fleksibelt. Forskjellen er knapt merkbar, men når bruksområdet varierer, kan også materialvalget være viktig

FORPAKNING


Forpakningen er en **peel-pakning** laget av papir og plast. Den har et hull øverst slik at den kan henges opp.

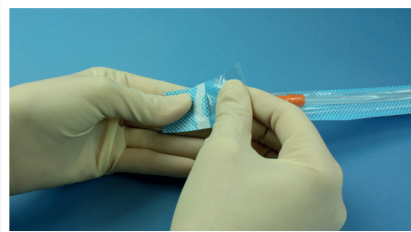


Forpakningen har også et belegg med blå-prikket innside, som gjør at papiret enkelt kan skilles fra plasten **uten å rive det fra hverandre**. Sørg for sikker og aseptisk åpning

Produktene pakkes i henhold til trelagsprinsippet. 100 sugekatetre i en avdelingspakke, 6 avdelingspakker med 600 sugekatetre i en transportboks. Minste bestillingsbare enhet er 100 stk. = MBE.

For enklere håndtering av avdelingsforpakningen tilbyr nå Mediplast **enkeltpakkede sugekatetre**. Produktet er lettere å få ut, mens du kan være sikker på at katetrene lagres rett og flatt inne i esken.

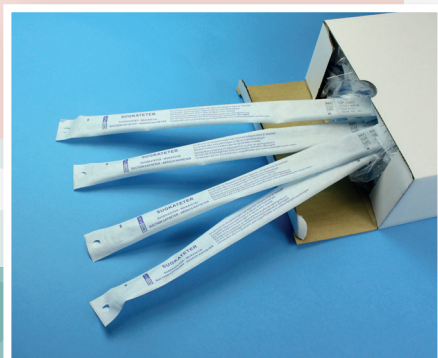

Standard-emballasjen er ellers at sugekatetrene ligger i **perforerte ark** inne i avdelingspakken, noe som fremdeles gjør det mulig å ta ut ett sugekateter om gangen, men forenkler fordelingen i tilfeller der du vil legge katetrene i en holder.

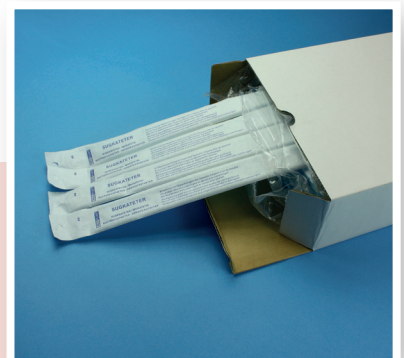

SUGEKATETER RETT, 25 CM

PVC fri singelpakket	PVC fri singelpakket i ark	PVC ATBC singelpakket i ark	Størrelse	Farge	Avd./Trpt.fp
	60880525	60130525-1	05	grå	100/600
608806251	60880625	60130625-1	06	lysegrønn	100/600
608808251	60880825	60130825-1	08	lyseblå	100/600
608810251	60881025	60131025-1	10	svart	100/600
608812251	60881225	60131225-1	12	hvit	100/600
608814251	60881425	60131425-1	14	grønn	100/600
	60881625		16	orange	100/600


SUGEKATETER RETT, 40 CM

PVC fri singelpakket	PVC fri singelpakket i ark	PVC ATBC singelpakket i ark	Størrelse	Farge	Avd./Trpt.fp
	60880540		05	grå	100/600
608806401	60880640	60130640-1	06	lysegrønn	100/600
608808401	60880840	60130840-1	08	lyseblå	100/600
608810401	60881040	60131040-1	10	svart	100/600
608812401	60881240	60131240-1	12	hvit	100/600
608814401	60881440	60131440-1	14	grønn	100/600
608816401	60881640	60131640-1	16	orange	100/600

SUGEKATETER RETT, 53 CM


PVC fri singelpakket	PVC fri singelpakket i ark	PVC ATBC singelpakket i ark	Størrelse	Farge	Avd./Trpt.fp
608806531	60880653	60130653-1	06	lysegrønn	100/600
608808531	60880853	60130853-1	08	lyseblå	100/600
608810531	60881053	60131053-1	10	svart	100/600
608812531	60881253	60131253-1	12	hvit	100/600
608814531	60881453	60131453-1	14	grønn	100/600
608816531	60881653	60131653-1	16	orange	100/600
		60131853-1	18	rød	100/600

avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

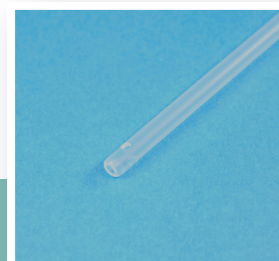

SUGKATETER, COUDÉ, 53 CM

PVC fri singelpakket	PVC fri singelpakket i ark	PVC ATBC singelpakket i ark	Størrelse	Farge	Avd./Trpt.fp
608708531	60870853	60170853-1	08	lyseblå	100/600
608710531	60871053	60171053-1	10	svart	100/600
608712531	60871253	60171253-1	12	hvit	100/600
608714531	60871453	60171453-1	14	grønn	100/600
608716531	60871653	60171653-1	16	orange	100/600

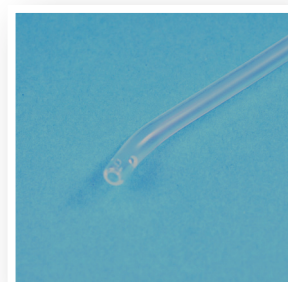

SUGKATETER, MED VAKUUMKONTROLL, CM-GRADERET, 35 CM

PVC ATBC singelpakket i ark	Størrelse	Farge	Avd./Trpt.fp
60151804-1	04	lilla	100/600
60151805-1	05	grå	100/600
60151806-1	06	lysegrønn	100/600
60151808-1	08	lyseblå	100/600
60151810-1	10	svart	100/600

SUGKATETER, MED VAKUUMKONTROLL, 53 CM

PVC ATBC singelpakket i ark	Størrelse	Farge	Avd./Trpt.fp
60150653-1	06	lysegrønn	100/600
60150853-1	08	lyseblå	100/600
60151053-1	10	svart	100/600
60151253-1	12	hvit	100/600
60151453-1	14	grønn	100/600
60151653-1	16	orange	100/600
60151853-1	18	rød	100/600

avd. fp. = minste kvantitet / bestilling



Å jobbe med menneskers helse er en viktig oppgave. Vi i Mediplast møter daglig dedikerte mennesker innen helsevesenet som gjør sitt ytterste for å gi pasientene bedre og sikrere behandling. Et arbeid som i dagens samfunn skal skje til et økt antall pasienter, på kortere tid og med færre ressurser.

For å forbedre helsetjenestene står Mediplast ved din side, alltid klare til å levere kunnskap og innovative løsninger.

Vi tror på gode relasjoner. Ved daglig å være tilstede ute i de ulike sykehusavdelingene, ser vi dine behov og imøtekommer tilbakemeldinger. Gjennom høy kompetanse og mange års erfaring kan vi tilby kunnskap og råd som utgjør en forskjell.

En synlig partner innen den nordiske helsetjenesten.

Mediplast er en svensk leverandør av medisinsk tenkniske produkter hvorav Norden innehar hoveddelen av vårt marked. Vårt produktsortiment består både egne produkter av høy kvalitet som ofte er utviklet i samarbeid med våre kunder i helsevesenet. I tillegg har vi produkter fra velkjente leverandører.

Vårt produktsortiment er bredt og inneholder alt fra engangsutstyr til avansert kapitalutstyr. Produktene våre dekker områder som operasjon, Thorax/Nevro/kardiologi, bandasjemateriell, intensiv, Øre-Nese Hals, Stomi og Hjemmesykepleie.

Avfallssortering

Peelpack: Todelt - Papir → papiravfall
Plastikk (PP/PE) → plastikkavfall
Indre forpakning: LDPE → plastikkavfall
Avdelningsforpakning, hvit: → papiravfall
Transportboks, brun: → papiravfall