

CatAbs™

Bandagering af urostomier med kateter



CatAbs™ bandagen er beregnet til brug ved bandagering og evt. udslip fra suprapubisk urostomi med kateter, som t.ex. Cystofix®.

(Obs! CatAbs er ikke egnet til gastrostomier!)

Bandagen er lavet af et luft- og lugttæt plastlaminat og indeholder en blød superabsorbent. Bandagen fæstner til huden med en hudvenlig hydrokolloid og er forsynet med en slids, som letter placeringen rundt om kateteret. Slidsen åbnes og lukkes med en medfølgende tape. CatAbs™ kan holde fast på huden i 2 - 3 dage og tåler et brusebad. Kontroller bandagen ofte og skift efter behov.

CatAbs™ fås i to størrelser: 3 og 7 mm. Bemærk, at hulstørrelserne er relativt fleksible og derfor også passer til noget større kateterstørrelser

| Varenr. | Skin X CatAbs™ Ø 70 mm | French | Absorption |
|---------|------------------------|---------|------------|
| 204641 | Hulstørrelse 3 mm | ca. 9F | 10 ml |
| 204642 | Hulstørrelse 7 mm | ca. 20F | 10 ml |

30 styk i hver pakning