



Medifusor

Övertrycksmanschett

Övertrycksmanschetten är en uppblåsbar manschett som är avsedd att utöva tryck på iv-påsen för att underlätta snabb vätskeinfusion.

- Finns i nylonbelagd PU (polyuretan) för både 500 ml och 1000 ml infusionspåse, avsedd för engångsbruk
- Dessutom i två olika storlekar i transparent PU, 500 ml alternativt 1000 ml infusionspåse, avsedd för flergångsbruk
- Arbetstrycket ligger mellan 0~300 mmHg
- Läs bruksanvisningen före användning

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
604805	Grå nylon 500-1000 ml	1/6
604807	Transparent 500 ml	1/6
604810	Transparent 1000 ml	1/6
Reservdel		
604811	Pump med trevägsventil passar till alla manschetterna	1/30

Avd.fp = min.kvant/best



Rengöring och underhållMedifusor övertrycksmanschett – för flergångsbruk

1. Torka av ytan på manschetten, slangen och tryckblåsan med 70 % alkohol, undvik mätaren. Spraya inte alkohol så att dimma kan komma in i mätaren och låt den torka i rumstemperatur i flera minuter. Kontrollera att mätaren är helt torr före förvaring.
2. Kontrollera regelbundet om mätarens visare rör sig genom att pumpa lite på blåsan, samt om visaren stannar på noll när inget tryck tillämpas

Material:

art 604805 Nylonbelagd PU
art 604807 Transparent PU
art 604810 Transparent PU
Slangar och pump i PVC

