











PRODUKTSPECIFIKATIONER			
Produktnavn	Sharpsafe kanyleboks 4,0 liter		
Producent	Frontier Medical Group, South Wales, UK		
Varenummer	DK4100A		
Anvendelse og montering	<p>Kanyleboksen er engangs og anvendes til sikker bortskaffelse af skarpt og smittefarligt affald</p> <p>Boksen er stabelbar og leveres usamlet – vend arket for vejledning</p>		
Kapacitet op til fyldstreg (nettoindhold)	3,0 liter		
Dimensioner (h x b x d)	247 x 175 x 175 mm		
Aftagstyper	Luer lock, Luer slip, Novo-pen, skalpel, sommerfugl, blodtagningssystem		
Vægt (uden indhold)	320 gr		
Pakning	Karton: 50 stk. / Europalle: 7 x karton		
Materiale	Polypropylen (miljøvenligt materiale der omdannes til vand og kuldioxid ved forbrænding)		
Godkendelser			<p>Produktet bærer to godkendelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitemark® (British Standard)</li> <li>2. UN (United Nations)</li> </ol>
Advarsler			<p>Produktet bærer to advarsler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boksens indhold udgør en biologisk risiko</li> <li>2. Kom ikke fingrene ned i boksen pga. risiko for stikskader</li> </ol> <p><b>HUSK!</b> Der bør altid udvises forsigtighed og agtpågivenhed i håndteringen af brugte kanylebokse</p>
Bortskaffelse	<p>Bortskaffelse sker ved forbrænding</p> <p>Kanyleboksen er forsynet med en etiket (på engelsk), hvor man aht. sporing kan udfylde dato for ibrugtagning m.m.</p>		
Beslag, stands og ophæng (Varenummer og beskrivelse)	DK4290	Krog	
	DK4200	Bøjle	


Vend arket og se vejledning →

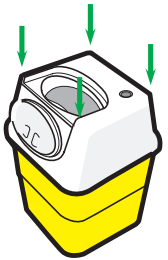

## SÅDAN SAMLER OG ANVENDER DU SHARPSAFE KANYLEBOKSEN

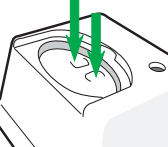 <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>	<p><b>Montering</b> Sæt låget på beholderen Tryk på hvert hjørne af låget Et hørbart klik bekræfter, at låget er monteret korrekt på beholderen</p>
 <p style="text-align: right;"><b>2</b></p>	<p><b>Midlertidig lukning</b> Låget kan lukkes midlertidigt og åbnes igen ved at presse det let ned</p>
 <p style="text-align: right;"><b>3</b></p>	<p><b>Åbning af midlertidig lukning</b> For at åbne midlertidig lukning, ryk op i den lille flap</p>
 <p style="text-align: right;"><b>4</b></p>	<p><b>Permanent lukning</b> Når boksen er fuld, pres fast ned på låget og kanyleboksen er lukket permanent</p>

DK 200722

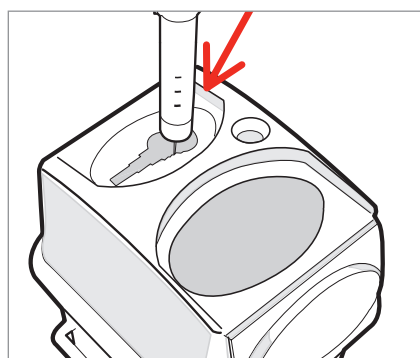

### AFTAG PÅ SHARPSAFE 4,0 LITER

- Luer lock
- Luer slip
- Novo-pen
- Skalpel
- Sommerfugl
- Blodtagningssystem

Forhandler:

**MEDI PLAST**

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com