

eFlow[®] rapid

Rengöringsbeskrivning för eFlow *rapid* vid användning i hemmet




Montera isär alla delar till eFlow *rapid*

(nebuliseringskammare och läkemedelsbehållaren är hopmonterade och kan inte plockas isär)



Peta eller vidrör aldrig aerosolgeneratoren, då den kan skadas.

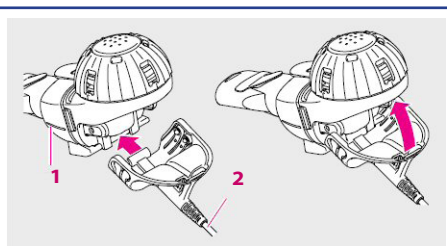

Anslutning av nebulisatorn

Sätt kabelns nebulisatoradapter (1) på nebuliseringskammarens gångjärnsaxel (2) och stäng den uppåt så att metallkontaktarna går i varandra.

Rengöringsbeskrivning för eFlow *rapid* elektronisk nebulisator

För dig som använder din eFlow *rapid* i hemmiljö bör denna beskrivning följas efter varje inhalation.

Snabbguide

1. Rengör omedelbart

Kör igenom med kranvatten, destillerat eller sterilt vatten under 15 sek.

Montera isär alla delar till eFlow *rapid* och skölj i rinnande varmt vatten.



2. Desinficera

Desinfektor - rengör delarna genom att ångdesinficera i ca 15 minuter. Alternativt lägg delarna i kokande vatten. På orter med kalkhaltigt vatten rekommenderar vi att man använder destillerat vatten.



3. Torka

Låt delarna lufttorka i ungefär 4 timmar .

4. Förvara

Förvaras på ren och torr plats.



easycare rengöringstillsats för eFlow aerosolgenerator



Rengöringstillsatsen easycare kan bidra till att nebuliseringstiden förkortas vid avtagande nebuliseringseffekt.
Fylls med 5 ml isotonisk koksaltlösning (0,9 %).

Funktionstest för aerosolgeneratoren



Mät nebuliseringstiden med 2,5 ml isotonisk koksaltlösning (0,9 %) utan att inhalera.

1. Om nebuliseringen är längre än **fyra minuter** rekommenderas rengöring med easycare rengöringstillsats.



2. Om nebuliseringen tar **längre tid än fem minuter**, skall aerosolgeneratoren bytas ut.



Om nebuliseringen tar längre tid än fyra minuter enligt ovan, kan även rengöring med ättika vara ett alternativ på orter med kalkhaltigt vatten.

Hygienrutinerna skiljer sig på olika orter. Vid ytterligare frågor hör gärna med respektive sjukhus om gällande hygienrutiner.

Se också fullständig bruksanvisning för eFlow *rapid* respektive easycare rengöringstillsats.

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com